


Masque anti-projections jetable

Destiné à éviter lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie de gouttelettes.


Kit de 50 exemplaires à monter pour une **utilisation strictement personnelle**. Respectez les consignes d'hygiène appropriées, lavez vos mains avant et après utilisation, à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique. Usage unique, max. **4 heures**. Ne pas réutiliser, ne pas prêter un masque déjà utilisé.



1-4

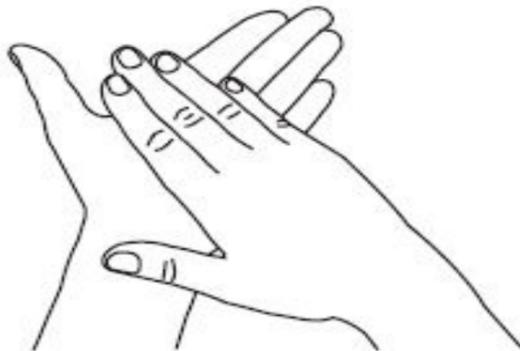

2

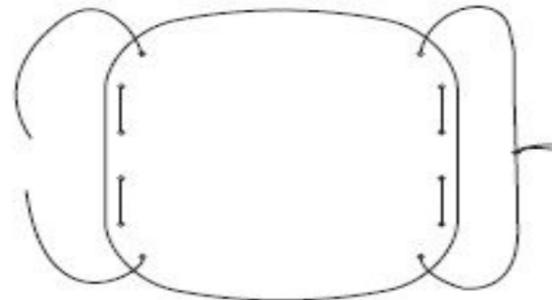

3



1-4 Lavez-vous les mains en suivant les consignes d'hygiène appropriées.

2- Sur un espace désinfecté ou un papier A4 vierge, procédez au laçage et faites un nœud.

3- Placer le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton et passer les lacets autour des oreilles.

L'élastique dans le premier trou permet de plaquer le masque sur le visage

5- Jeter dans un sac hermétique après usage.

